



CZ Kojenecká váha
Návod k použití



Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Naše jméno stojí za vysokohodnotnými a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krevního tlaku, tělesné teploty, hmotnosti, masáže a vzduchu.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S přátelským doporučením
Váš Beurer-Team

! Důležitá upozornění

1. Pozor

- Měli byste váhy chránit před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).
- Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis firmy Beurer nebo autorizovaní prodejci.
- Všechny váhy odpovídají předpisům Evropského společenství 2004/108 + doplňkům. V případě dalších otázek ohledně používání našich přístrojů se prosím obraťte na svého prodejce nebo na zákaznický servis firmy Beurer.
- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadříku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy nepoňujte váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Uložení: Nepokládejte na váhy žádné předměty, pokud se nepoužívají.
- Přesnost vah může být zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).
- Zatížitelnost vah je max. 20 kg (44 lb, 704 oz). Při vážení se zobrazují výsledky s přesností na 5 g (0.02 lb, 0.20 oz).
- Postavte váhy na pevný a rovný podklad; pevná plocha k stání je předpokladem pro správné měření.
- Váhy nejsou určené pro komerční použití.
- Odstraňte případné zabezpečení pro dopravu.


2. Použití

2.1 Baterie

Do váhy jsou potřebné 2 baterie typu 1,5 V Mikro AA. Baterie je třeba před uvedením kojenecké váhy do provozu vložit do přihrádky na baterie na spodní straně váhy. Dbejte na správnou polaritu. Objeví-li se na ukazateli údaj „LŮ“, musí se baterie vyměnit.


Vypotřebované baterie nepatří do domácího odpadu. Odevzdejte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem.


Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsahujících škodlivé látky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

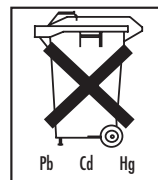

2.2 Vážení

Hmotnost se zobrazuje v krocích po 5 g od minimální hmotnosti 50 g.

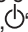Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko „“.

Jakmile se na displeji zobrazí značka „ kg“, je váha připravená k měření.

Položte miminko na plochu váhy. Buďte velmi opatrní, nenechte dítě spadnout a dávejte pozor na jeho hlavičku.

Kojenecká váha má funkci zachycení hmotnosti „HOLD“ (AUTO HOLD a MECHANICAL HOLD). Funkce AUTO HOLD zachytí a podrží přesnou hmotnost dítěte, jakmile leží dostatečně dlouho v klidu. Pokud se dítě hodně pohybuje, nelze jeho hmotnost změřit. Pokuste se proto neposedné dítě uklidnit, abyste rychle dokázali zjistit jeho hmotnost. Dítěte se ale nedotýkejte, mohli byste tím ovlivnit měření hmotnosti.

Jakmile je hmotnost dítěte zachycena, přestane blikat nápis „HOLD“ a na displeji se na 20 sekund zobrazí naměřená hmotnost. Pak se váha automaticky vypne.

Pokud je dítě velmi neposedné, můžete stisknutím tlačítka „HOLD“ zvolit funkci MECHANICAL HOLD (mechanické zachycení hmotnosti). Během 3 sekund přestane blikat nápis „HOLD“ a na displeji se na 20 sekund zobrazí naměřená hmotnost.

Jakmile bude zafixována hmotnost kojence, objeví se blikající nápis „HOLD“ a hmotnost zůstane zobrazena po dobu 5 vteřin. Váha se automaticky vypne. Pokud chcete hmotnost uložit, je třeba během těchto 5 vteřin stisknout „M“. Namísto „HOLD“ nyní bliká „M“. Tato hodnota je nyní uložena a objeví se, až kojeneckou váhu příště zapnete.

Nechcete-li kojence položit přímo na vážicí plochu, ale například na ručník, musíte ručník vložit na váhu PŘED zapnutím. Pokud ručník nebo jiná zátěž, kterou budete chtít po zvážení opět odečíst, váží více než 50 g, můžete použít funkci „TARA“. Po stisknutí tlačítka tare se na displeji zobrazí symbol táry. Tlačítko TARA stiskněte, jakmile jsou zátěže pro odečtení zváženy a bliká „HOLD“. Poté položte kojence na váhu a postupujte, jak je popsáno výše.

Pro nastavení váhy zpět na  g stiskněte tlačítko TARA poté, co přestalo blikat „HOLD“.

Při dodání je váha nastavena na měrnou jednotku „kg“. Tlačítkem „kg/lb/oz“ můžete kdykoli listovat mezi jednotkami kilogram „kg“, libra „lb“ a unce „oz“.

2.3 Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



