

beurer

IL 35



CZ **Infračervená lampa**
Návod k použití

Obsah

1. K seznámení	2	6. Ovládání	5
2. Vysvětlení symbolů	2	7. Výměna infračervené žárovky	6
3. Pokyny	3	8. Čištění a ošetřování přístroje	6
4. Popis přístroje	4	9. Likvidace	6
5. Uvedení do provozu	4	10. Technické údaje	6

1. K seznámení

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Použití

Tato infračervená žárovka je určena pouze k ozařování lidského těla. Ozařováním infračerveným světlem se do těla člověka transportuje teplo. Ozářená pokožka se silněji prokrvuje. Dávno známou skutečností je, že teplo pomáhá mírnit bolesti a v mnoha případech urychluje léčení. Toto teplo vám nabízí velmi účinným způsobem infračervená lampa, jejíž infračervené záření proniká kůží hluboko do tkáně.

Obsah balení: Infračervená lampa
Tento návod k použití

i Upozornění: Omezení záruky
Dodávaná infračervená žárovka, stejně jako všechny osvětlovací prostředky, nepodléhá záruce.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití nebo na přístroji jsou uvedeny tyto symboly

	Dodržujte návod k použití		Chraňte před vlhkem
	Přístroj třídy ochrany II	 Upozornění	Upozornění na důležité informace
	Pozor, horký povrch		Výrobce
 Varování	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví		Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
 Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/ příslušenství		Vzdálenost mezi infračervenou žárovkou a ozařovanou částí těla

	Kód šarže		Shoda produktů s ruskými normami
	Značka CE		

3. Pokyny

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Bezpečnostní pokyny

Varování

- Tato infračervená žárovka je určena pouze k ozařování lidského těla.
- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Vždy dbejte na to, aby přístroj stál bezpečně na rovném podkladu.
- Kryt lampy a infračervená žárovka se během provozu silně zahřívají. Při dotyku hrozí nebezpečí popálení! Nechte lampu zchladit a pak se jí můžete dotýkat.
- Vzdálenost od hořlavých předmětů k infračervené žárovce činí minimálně 1,0 m. Přístroj nezavěšujte na zeď nebo na strop.
- Přístroj se smí připojit pouze k síťovému napětí, které je uvedeno na výrobním štítku.
- Neponořujte přístroj do vody a nepoužívejte ho ve vlhkých prostorách.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Nepoužívejte u osob se sníženou citlivostí na teplo.
 - u diabetických pacientů,
 - u osob trpících ospalostí, demencí nebo poruchami koncentrace,
 - u osob s onemocněním projevujícím se změnami na kůži,
 - u osob s jizvami na kůži v oblasti aplikace,
 - u osob s alergiemi,
 - u dětí a starších osob,
 - po požití léků nebo alkoholu.
- V případě akutních zánětlivých procesů byste měli možnost ozařování nejprve konzultovat s lékařem.
- Vždy omezte délku používání a kontrolujte reakci kůže.
- Léky, kosmetické přípravky nebo potraviny mohou za určitých okolností vyvolat přecitlivělou nebo alergickou reakci pokožky. V takovém případě ozařování ihned ukončete.
- Během ozařování nikdy nespěte!
- Příliš dlouhé ozařování může způsobit popáleniny.
- Nedotýkejte se infračervené žárovky ani ji nevyšroubovávejte, jestliže je přístroj zapojen do sítě.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při používání elektrických přístrojů. Postarejte se o to, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
- Přístroj se může používat pouze pod dozorem.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Pokud je přístroj zahřátý, nesmíte ho zakrývat nebo vkládat do obalu k uschování.

- Vždy než se budete chtít dotknout přístroje, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zchladit.
- Přístroje v zapnutém stavu se nedotýkejte vlhkými rukama; na přístroj nesmí stříkat voda. Přístroj můžete používat jen tehdy, pokud je úplně suchý.
- Chraňte přístroj před silnými nárazy. Platí to pro i pro necitlivou instalaci.
- Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky za napájecí kabel!
- V případě závad nebo provozních poruch přístroj okamžitě odpojte od sítě.
- Pokud je síťový kabel přístroje poškozený, musí být nahrazen prodejcem nebo autorizovanou dílnou zákaznického servisu, aby se zabránilo nebezpečím.
- Odpojení od elektrické sítě je zajištěno pouze v případě, že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.
- U malých dětí hrozí nebezpečí uškrcení při zamotání do síťového kabelu.

Obecné pokyny

⚠ Pozor

- Produkt není vhodný k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento přístroj není určen pro průmyslové nebo klinické použití, nýbrž výhradně pro použití v domácnosti!
- Při zdravotních problémech jakéhokoliv druhu se obraťte na svého praktického lékaře!
- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Světelné zdroje jsou ze záruky vyloučeny.

Opravy

⚠ Pozor

- Přístroj nesmíte otvírat. Nepokoušejte se nikdy opravovat přístroj sami. Mohlo by dojít k závažným poraněním. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

4. Popis přístroje



5. Uvedení do provozu

Instalace

Vyjmete přístroj z obalu. Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál. Před použitím zkontrolujte, zda je infračervená žárovka zcela zašroubována. Položte ho na rovnou plochu. Kryt přístroje je možné nastavovat. Nastavte sklon krytu podle svých individuálních potřeb.

Připojení k síti

Přístroj se smí připojit pouze k síťovému napětí uvedenému na výrobním štítku.

i Upozornění:

- Dbejte na to, aby se zásuvka nacházela v blízkosti umístění přístroje.
- Síťový kabel vedte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

6. Ovládání

1	Zapnutí lampy ► Zástrčku zasuněte úplně do zásuvky, aby bylo zajištěno správné síťové připojení. Po zapojení do zásuvky bliká LED kontrolka „5 min“. Jedná se o kontrolku pohotovostního stavu (standby). Stiskněte vypínač (4), lampa se zapne.								
2	Radost ze světla Při ozařování obličejte vždy zavřete oči, abyste zabránili jejich poranění (nedívejte se přímo do infračerveného světla). Doporučujeme používat lampu max. 15 minut na jednom místě a max. dvakrát denně. Zpočátku doporučujeme kratší dobu ozařování. Kůže u jednotlivých lidí však může i při správném použití přístroje zareagovat na tepelné záření přecitlivěle (např. silné zarudnutí, vytvoření puchýřů, svědění, nadměrné pocení) nebo se může spustit alergická reakce.								
3	Ukazatel LED / časovač Infračervená lampa IL 35 ukazuje aktuální dobu ošetření pomocí 3 kontrolky LED. Doba ošetření se může nastavit v 3 různých stupních. Pro nastavení časovače stiskněte vypínač (4) a počkejte, dokud se nerozsvítí požadované časy nastavení časovače. Časy se nastavují takto <table border="1"><thead><tr><th>Doba ošetření</th><th>Počet svítících kontrolky LED</th></tr></thead><tbody><tr><td>5 minut</td><td>1</td></tr><tr><td>10 minut</td><td>2</td></tr><tr><td>15 minut</td><td>3</td></tr></tbody></table> Po uplynutí nastavené doby ošetření se lampa automaticky vypne. Pokud budete chtít lampu vypnout ručně dříve, stiskněte jednou nebo víckrát vypínač (4), aby blikala jen kontrolka LED „5 min“, ostatní LED nesvítí a žárovka zhasne.	Doba ošetření	Počet svítících kontrolky LED	5 minut	1	10 minut	2	15 minut	3
Doba ošetření	Počet svítících kontrolky LED								
5 minut	1								
10 minut	2								
15 minut	3								
4	Na co byste si měli dávat pozor Vzdálenost mezi infračervenou žárovkou a ozařovanou částí těla by neměla překročit tuto hodnotu: minimálně 80 cm V zásadě platí: Pravidelně kontrolujte ozařované části těla. Při náznacích přecitlivělé nebo alergické reakce ihned ukončete ozařování a poraďte se s lékařem.								
5	Vypnutí lampy POZOR! Lampa je po použití horká. Nechejte lampu dostatečně dlouhou dobu chladnout, než ji uklidíte a/nebo zabalíte! Respektujte, že se síťový kabel nesmí omotávat kolem infračervené lampy ani při uskladnění ani při provozu. Síťovou zástrčku musíte po použití vytáhnout ze zásuvky, aby se přístroj úplně vypnul.								

7. Výměna infračervené žárovky

Před každým čištěním a při výměně infračervené žárovky musíte přístroj vypnout, odpojit od sítě a počkat, dokud se přístroj neochladí.

Respektujte, že se při výměně infračervené žárovky musí používat pouze originální typ.

Náhradní žárovka / typ:	Technické údaje:	Číslo výrobku:
Infrared PAR 38 (150 W)	230 V ~ 50 Hz	616.51

Varování

- Nedotýkejte se infračervené žárovky ani ho nevyšroubovávejte, jestliže je zapojen do sítě.
- Přístroj odpojte od sítě, abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být přístroj likvidován spolu s domácím odpadem.

8. Čištění a ošetřování přístroje

Přístroj by se měl po určité době používání očistit.

Pozor

Doporučujeme pravidelné čištění přístroje, abyste zabránili tvorbě zápachu kvůli nasátým žmolčkům a prachovým nečistotám:

- Před každým čištěním a při výměně infračervené žárovky musíte přístroj vypnout, zástrčku vytáhnout ze sítě a počkat, dokud se přístroj neochladí.
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná voda!
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
K čištění používejte navlhčenou utěrku, na kterou můžete nanést v případě potřeby trochu čisticího prostředku.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky a nikdy přístroj neumývejte pod vodou.
Přístroje v zapnutém stavu se nedotýkejte vlhkýma rukama; na přístroj nesmí stříkat voda.
- Přístroj můžete používat jen tehdy, pokud je úplně suchý.

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



10. Technické údaje

Připojení k síti	220–230 V~ / 50–60 Hz
Příkon	150 W
Rozměry (š × v × h)	145 × 220 × 175 mm
Hmotnost	cca 800 g
Provozní podmínky	Teplota: +5 °C až +35 °C relativní vlhkost vzduchu: 15–93 %
Skladovací a přepravní podmínky	Teplota: -25 °C až +70 °C relativní vlhkost vzduchu: až 93 %
Spotřeba v režimu standby	< 0,5 W

