

beurer

PS 240



- D** Personenwaage
Gebrauchsanleitung
- GB** Bathroom scale
Instruction for Use
- F** Pèse-personne
Mode d'emploi
- E** Báscula de baño
Instrucciones para el uso
- I** Bilancia pesapersone
Instruzioni per l'uso
- TR** Terazi
Kullanma Talimatı
- RUS** Напольные весы
Инструкция по применению
- PL** Waga osobowa
Instrukcja obsługi
- NL** Personenweegschaal
Gebruikershandleiding
- P** Balança de banho
Instruções de utilização

- GR** Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσεως
- DK** Personvægt
Betjeningsvejledning
- S** Personvåg
Bruksanvisning
- N** Personvekt
Bruksveiledering
- FIN** Henkilövaaka
Käyttöohje
- CZ** Osobní váha
Návod k použití
- SLO** Osebna tehničica
Navodila za uporabo
- H** Személymérleg
Használati utasítás
- RO** Cântar pentru persoane
Instructiuni de utilizare
- میزان الأشخاص
دليل الاستعمال

إرشادات عامة

- الحد الأقصى لقوة الحمل يبلغ 180 كجم (396 رطل / 28 حجر)، التدرج 50 جرام (0,1 lb / 0,005 st)
- التنظيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر وبمللة. ولا تقم بشطفه أبداً تحت ماء جار.
- احرص على حماية الميزان من التعرض للصدمات والرطوبة والاتربة والغبار والمواد الكيميائية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة والحالات الكهرومغناطيسية وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة.
- لا تتصعد أبداً من جانب واحد على الحافة الخارجية للميزان: خطر الانقلاب!
- أبعد الأطفال عن مواد التغليف.
- الميزان غير مخصص للاستخدام التجاري.
- إذا كانت لديك استفسارات حول استخدام الجهاز الخاص بنا، من فضلك توجه إلى الموزع الذي تتعامل معه أو إلى مركز خدمة العملاء.
- قم بفحص البطاريات قبل أي شكوى، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المتاجر المعتمدة.
- يجب التخلص من البطاريات المستهلكة أو الفارغة الشحنة تماماً عن طريق إلقائها في حاويات مهلات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسليمهم لمستودعات تجميع القمامه الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية.

حيث أنك مطالب بالتخلص من البطاريات بموجب القانون.



- إرشاد: تجد هذه العلامة على البطاريات المحتوية على مواد ضارة:

Pb = بطارية تحتوي على الرصاص،

Cd = بطارية تحتوي على الكadmium،

Hg = بطارية تحتوي على الزينق.

- احرص على اتباع التعليمات واللوائح المحلية عند التخلص من المواد. تخليص من الجهاز طبقاً لمواصفة 2002/96/EC - WEEE من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة. في حالة وجود أية استفسارات توجه إلى الجهة المحلية المسئولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.

