





CS	Výhřevná poduška na záda a šíji	
	Návod k použití.....	2
SK	Elektrická poduška na vyhrievanie chrbta/krku	
	Návod na obsluhu.....	8

Obsah

1. Obsah balení	3	4.4 Nastavení teploty	5
1.1 Popis zařízení	3	4.5 Funkce automatického vypnutí	6
2. Důležité pokyny		4.6 Vypnutí	6
Uchovejte pro pozdější použití	3	5. Čištění a údržba	6
3. Použití v souladu s určením.....	4	6. Uložení.....	7
4. Obsluha	5	7. Likvidace	7
4.1 Bezpečnost	5	8. Co dělat v případě problémů?.....	7
4.2 Uvedení do provozu	5	9. Technické údaje.....	7
4.3 Zapnutí	5	10. Záruka / servis	7

Vysvětlení symbolu

	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Nebělit
	Nezapichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte příkrývku složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky
	Nevhodné pro děti do tří let.		Tekstil, ki je bil uporabljen za to napravo, izpolnjuje visoke humano-ekološke zahteve standarda Oeko-Tex 100, kakor je bilo dokazano na raziskovalnem inštitutu Hohenstein.
 	Obal zlikvidujte ekološki.		
	VAROVÁNÍ; Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		


	POZOR; Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.
	UPOZORNĚNÍ; Upozornění na důležité informace.

1. Obsah balení

- 1 Výchřevná poduška
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

1.1 Popis zařízení

1. Síťová zástrčka
2. Síťový kabel
3. Vypínač
4. Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
6. Zástrčka

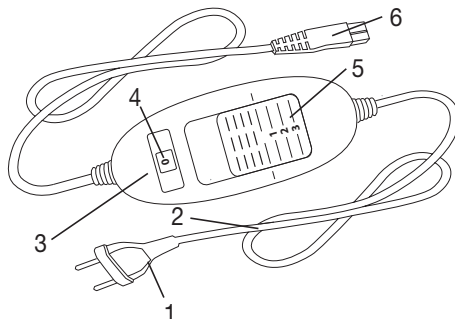

2. Důležité pokyny

Uschovejte pro pozdější použití

VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto výchřevnou podušku nesmějí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, kteří neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Tuto výchřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto výchřevnou podušku nesmí používat děti (3–8 roky), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřívanou podložkou bezpečně zacházet.
- Tuto výchřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem

nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání výhřevné podušky a pokud chápou případná rizika.

- Děti si s výhřevnou podušku nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato výhřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
- Do podušky nevpichujte žádné špendlíky!
- Nepoužívejte podušku, jestliže je složená.
- Nepoužívejte podložku, jste-li mokří.
- Tuto výhřevnou podušku lze použít pouze ve spojení s vypínačem uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této elektrické výhřevné podušky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Zdaleka však nedosahují mezních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT.

Před použitím této výhřevné podušky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.

- Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
- Tuto výhřevnou podušku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.

Pokud se takové známky objeví, výhřevná poduška nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.

- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- V době, kdy je výhřevná poduška zapnutá, se na ni nesmí pokládat – žádné předměty (např. kufr nebo koš na prádlo), – žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
- Elektronické součástky ve vypínači se při používání výhřevné podušky zahřívají. Z vypínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na výhřevné podušce, je-li zapnutá.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením



POZOR

Tato výhřevná poduška je určena pro zahřátí lidského těla.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnost



POZOR


Výhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snimačů v případě závady přehřátí výhřevné podušky po celé ploše. Jestliže BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypne výhřevnou podušku, přestanou v zapnutém stavu svítit teplotní stupně. Respektujte prosím, že po závadě již výhřevnou podušku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.

Vadnou výhřevnou podušku v žádném případě nepřipojujte k jinému vypínači stejného typu. Bezpečnostní systém ve vypínači by rovněž aktivoval finální odpojení.

4.2 Uvedení do provozu

Zvláštní tvar této výhřevné podušky byl vyvinut speciálně pro použití v oblasti zad a šíje. Umístěte výhřevnou podušku na zádech tak, aby se suchý zip částí určené pro opření šíje nacházel na krku. Nejdříve zapněte suchý zip. Pak individuálně upravte délku upínacího břišního pásu a spojte oba konce spojky do sebe, aby se zavřela.


K otevření spojky stiskněte zároveň pojistky dle obrázku.

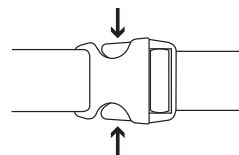

POZOR

Ujistěte se, že se výhřevná poduška při používání neshmula a nevytvořily se záhyby.

- Nejdříve propojte vypínač s topným tělesem tak, že zásuvkovou spojku spojte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

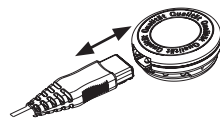

4.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2 nebo 3, výhřevná poduška se zapne. V zapnutém stavu jsou teplotní stupně (4) osvětlené.

4.4 Nastavení teploty

Stupeň 0: VYPNUTO

Stupeň 1: minimální teplota

Stupeň 2: střední teplota

Stupeň 3: maximální teplota



UPOZORNĚNÍ

Nejrychlejšího zahřátí výhřevné podušky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.



UPOZORNĚNÍ

Tato výhřevná poduška je vybavena rychlou ohřívací jednotkou, která umožňuje rychlejší zahřátí podušky během prvních 10 minut.



VAROVÁNÍ

Jestliže budete výhřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.

4.5 Funkce automatického vypnutí

Tato výhřevná poduška je vybavena funkcí automatického vypínání. Přívod tepla se přibližně 90 minut po zapnutí výhřevné podušky zastaví. Ukazatel teplotních stupňů začne blikat. Abyste opět mohli obnovit funkci výhřevné podušky, nastavte nejdříve posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně (5) na stupeň „0“ (VYPNUTO). Asi po 5 sekundách můžete podušku opět zapnout.



4.6 Vypnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“, výhřevná poduška se vypne. Teplotní stupně již nesvíí.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže nebudete výhřevnou podušku používat, nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“ (VYP) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím vypínač od výhřevné podušky.

5. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím vypínač od výhřevné podušky.



POZOR

- Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

Drobné znečištění výhřevné podušky můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.



POZOR

- Respektujte, že se výhřevná poduška nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit.

Tuto výhřevnou podušku lze prát v pračce.

Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



POZOR

- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní výhřevnou podušku velmi zatěžuje. Výhřevná poduška by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 10krát.

Ihned po vyprání rozprostřete ještě vlhkou výhřevnou podušku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.



POZOR

- K připevnění výhřevné podušky nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Vypínač připojte k výhřevné podušce teprve když je zástrčková spojka a celá vyhřívací poduška zcela suchá. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.

VAROVÁNÍ

- V žádném případě nezapínejte výhřevnou podušku proto, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

6. Uložení

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v originálním obalu. Odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky.

POZOR

Výhřevnou podušku nechejte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit. Během skladování na výhřevnou podušku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Náprava
Teplotní stupně nesvítí, zatímco - je vypínač řádně propojen s výhřevnou poduškou - je síťová zástrčka propojena s funkční zásuvkou - je posuvný spínač nastaven na stupeň 1, 2 nebo 3	Bezpečnostní systém výhřevnou podušku nezvratně vypnul.	Zašlete výhřevnou podušku a vypínač do servisu.

9. Technické údaje

Viz typový štítek na vyhřívané podušce

10. Záruka / servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zaslání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.
2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 - d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.

Obsah

1. Obsah balenia	9	4.4 Nastavenie teploty.....	11
1.1 Popis prístroja	9	4.4 Automatické vypnutie.....	12
2. Dôležité informácie		4.6 Vypnutie	12
Uchovajte na neskoršie použitie.....	9	5. Čistenie a starostlivosť	12
3. Použitie podľa určenia	10	6. Uskladnenie.....	13
4. Obsluha	11	7. Likvidácia.....	13
4.1 Bezpečnosť	11	8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?.....	13
4.2 Uvedenie do prevádzky.....	11	9. Technické údaje.....	13
4.3 Zapnutie	11	10. Záruka / servis	13

Vysvetlenie symbolov

	Prečítajte si pokyny		Extra šetrný prací program na 30 °C
			Nebieliť
	Nezapichovať ihly		Nesušiť v sušičke
			Nežehliť
	Nepoužívať zloženú alebo zhrnutú!		Nečistiť chemicky
	Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3 roky).	 <p>OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Special Article 06.0.43510 HOHENSTEIN HTTI geprüft auf Schadstoffe. Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100</p>	Textílie použité s týmto prístrojom spĺňajú vysoké humánno-ekologické požiadavky štandardu Oeko-Tex Standard 100, ako potvrdil aj výskumný inštitút Hohenstein.
	Obal ekologicky zlikvidujte.		
	VÝSTRAHA; Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.		
	POZOR; Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.		




UPOZORNENIE; Upozornenie na dôležité informácie.

1. Obsah balenia

- 1 Elektrická poduška
- 1 Spínač
- 1 Návod na použitie

1.1 Popis prístroja

1. Zástrčka
2. Sieťový kábel
3. Spínač
4. Osvetlený ukazovateľ teplotných stupňov
5. Posúvač na zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov
6. Zástrčkové elektrické pripojenie

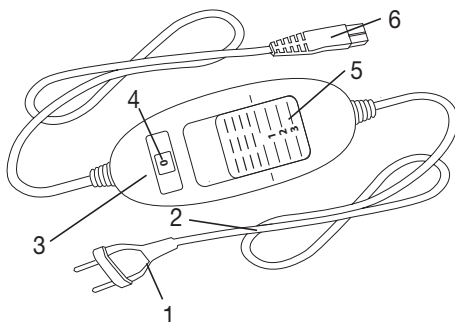

2. Dôležité informácie

Uschovajte na neskoršie použitie



VÝSTRAHA

- Nerešpektovanie nasledujúcich upozornení môže zapríčiniť osobné a vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Túto elektrickú podušku nesmú používať osoby, ktoré sú necitlivé na teplo ani osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).
- Táto elektrická poduška sa nesmie používať pri veľmi malých deťoch (0 – 3 roky), pretože tie nedokážu reagovať na prehriatie.
- Túto elektrickú podušku nesmú používať malé deti (3 – 8 rokov), okrem prípadov, kedy bol spínač nastavený rodičom alebo inou zodpovednou osobou a dieťa bolo poučené o bezpečnej prevádzke elektrickej podušky.
- Túto elektrickú podušku môžu používať staršie deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom a ak boli poučené o bezpečnom používaní elektrickej podušky a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré

z toho vyplývajú.

- Deti sa nesmú hrať s elektrickou poduškou.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Táto elektrická poduška nie je určená na používanie v nemocniciach.
- Nezapichujte ihly
- Nepoužívajte poskladanú alebo zhrnutú
- Nepoužívajte za mokra
- Táto elektrická poduška sa smie používať iba so spínačom uvedeným na etikete.
- Elektrické a magnetické polia produkované touto elektrickou poduškou môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: sila elektrického poľa: max. 5000 V/m, sila magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 mT.

Pred použitím tejto elektrickej podušky sa preto poraďte s lekárom a s výrobcom svojho kardiostimulátora.

- Neťahajte za káble, ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
- Elektrickú podušku je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia.
Ak sa takéto známky vyskytnú alebo ak bola elektrická poduška používaná nesprávne, príp. ak sa poduška nezohrieva, musí ju pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Keď je táto elektrická poduška zapnutá, nesmú sa na ňu ukladať – žiadne predmety (napr. kufor alebo kôš na bielizeň), – žiadne zdroje tepla, ako termofor, iné elektrické podušky a pod.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri používaní elektrickej podušky zohrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať a nesmie byť položený na elektrickej poduške, ak je táto v prevádzke.
- Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny pre obsluhu (kapitola 4), čistenie a starostlivosť (kapitola 5) a uskladnenie (kapitola 6).
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

3. Použitie podľa určenia



POZOR

Táto elektrická poduška je určená iba na zohrievanie ľudského tela.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnosť



POZOR


Elektrická poduška disponuje BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto snímacia technika zabraňuje prehriatiu elektrickej podušky po celej jej ploche prostredníctvom automatického vypnutia v prípade poruchy. Ak BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM elektrickej podušky vypol, teplotné stupne už v zapnutom stave nebudú viac osvetlené. Majte na pamäti, že elektrickú podušku nie je v prípade poruchy možné z bezpečnostných dôvodov ďalej používať a je potrebné ju zaslať na uvedenú servisnú adresu. Nikdy nepripájajte chybnú elektrickú podušku k inému spínaču rovnakého typu. To by taktiež viedlo ku konečnému vypnutiu bezpečnostného systému v spínači.

4.2 Uvedenie do prevádzky

Jedinečná forma tejto elektrickej podušky bola vyvinutá špeciálne pre použitie v oblasti chrbta a šije.

Položte elektrickú podušku na chrbát tak, aby sa suchý zips časti na šiju nachádzal v oblasti krku. Až potom zapnite suchý zips. Následne individuálne upravte dĺžku brušného pásu a spojte obidva konce spony, aby ste ju zatvorili.


Na otvorenie spony súčasne stlačte obidve uvoľňovacie tlačidlá, ako je zobrazené na obrázku.

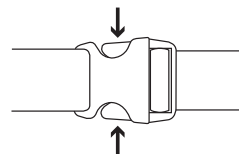

POZOR

Uistite sa, že sa elektrická poduška pri používaní nezhríňa a nevytvára záhyby.

- Najskôr pripojte spínač k vyhrievanej poduške tak, že spojíte zástrčkové elektrické pripojenie.
- Potom zasunúť sieťovú zástrčku do zásuvky.

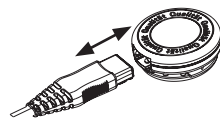

4.3 Zapnutie

Na zapnutie elektrickej podušky nastavte posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov na stupeň 1, 2 alebo 3.

V zapnutom stave sú teplotné stupne (4) osvetlené.

4.4 Nastavenie teploty

Stupeň 0: VYP.

Stupeň 1: minimálna teplota

Stupeň 2: stredná teplota

Stupeň 3: maximálna teplota



UPOZORNENIE

Najrýchlejšie zohriatie elektrickej podušky dosiahnete tak, že ju najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň.



UPOZORNENIE

Táto elektrická poduška disponuje funkciou rýchleho zahriatia, ktorá spôsobuje rýchle zohrievanie v rámci prvých 10 minút.



VÝSTRAHA

Ak sa elektrická poduška používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.

4.4 Automatické vypnutie

Táto elektrická poduška je vybavená automatickým vypínaním. Toto zastaví tvorbu tepla cca 90 minút po uvedení elektrickej podušky do prevádzky. Následne začne blikať ukazovateľ teplotných stupňov. Aby bolo možné opätovne uviesť elektrickú podušku do prevádzky, prepnite posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a teplotné stupne (5) najskôr na stupeň „0“ (VYP). Po približne 5 sekundách je možné opätovné zapnutie.



4.6 Vypnutie

Na vypnutie elektrickej podušky nastavte posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov na stupeň „0“ (VYP). Teplotné stupne už viac nebudú osvetlené.

UPOZORNENIE

Ak elektrickú podušku nepoužívate, prepnite posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov na stupeň „0“ (VYP) a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte zástrčkové elektrické pripojenie, a tým aj spínač od elektrickej podušky.

5. Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA

Pred čistením vždy najskôr odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Následne odpojte zástrčkové elektrické pripojenie, a tým aj spínač od elektrickej podušky.

POZOR

- Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. V opačnom prípade sa môže poškodiť.

Na čistenie spínača používajte suchú utierku nepúšťajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Malé fľaky na elektrickej poduške je možné odstrániť navlhčenou utierkou a príp. malým množstvom jemného pracieho prostriedku.

POZOR

- Dbajte na to, že elektrická poduška sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, mangľovať ani žehliť.

Túto elektrickú podušku je možné prať v pračke. Práčku nastavte na zvlášť šetrný prací program na 30 °C (prací program na vlnu). Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.

POZOR

- Majte na pamäti, že príliš časté pranie elektrickú podušku zaťažuje. Elektrická poduška by sa preto mala v rámci celej svojej životnosti prať v pračke max. 10-krát.

Hneď po vypraní ešte mokrú elektrickú podušku roziahnite na pôvodný rozmer a nechajte ju rozprestretú naplocho vysušiť na sušiaci na bielizeň.

POZOR

- Na upevnenie elektrickej podušky na sušiaci na bielizeň nepoužívajte štipce na bielizeň a pod. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.
- Spínač pripojte k elektrickej poduške až vtedy, keď sú zástrčkové elektrické pripojenie a elektrická poduška a textilný poťah kompletne vyschnuté. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.

VÝSTRAHA

- Elektrickú podušku v žiadnom prípade nezapínajte za účelom vysušenia! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

6. Uskladnenie

Ak elektrickú podušku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju uskladniť v originálnom obale. Na tento účel odpojte zástrčkové elektrické pripojenie a tým aj spínač od elektrickej podušky.

POZOR

Elektrickú podušku nechajte najskôr vychladnúť. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť. Počas skladovania na elektrickú podušku nekladte žiadne predmety, aby ste predišli jej ostrému zalomeniu.

7. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Príčina	Odstránenie
Teplotné stupne nie sú osvetlené, ak - je spínač kompletne spojený s elektrickou poduškou, - je sieťová zástrčka zapojená do funkčnej zásuvky, - je posuvný spínač nastavený na stupeň 1, 2 alebo 3.	Bezpečnostný systém nenávratne vypol elektrickú podušku.	Elektrickú podušku a spínač zašlite do servisu.

9. Technické údaje

Pozri etiketu s typovým štítkom na elektrickej poduške.

10. Záruka / servis

V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).

V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:

1. Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.
2. Opravy (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.

3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 - a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 - b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolanych osôb;
 - c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 - d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4. Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.

